



Ersatzteilliste ROLLATOR SPRING



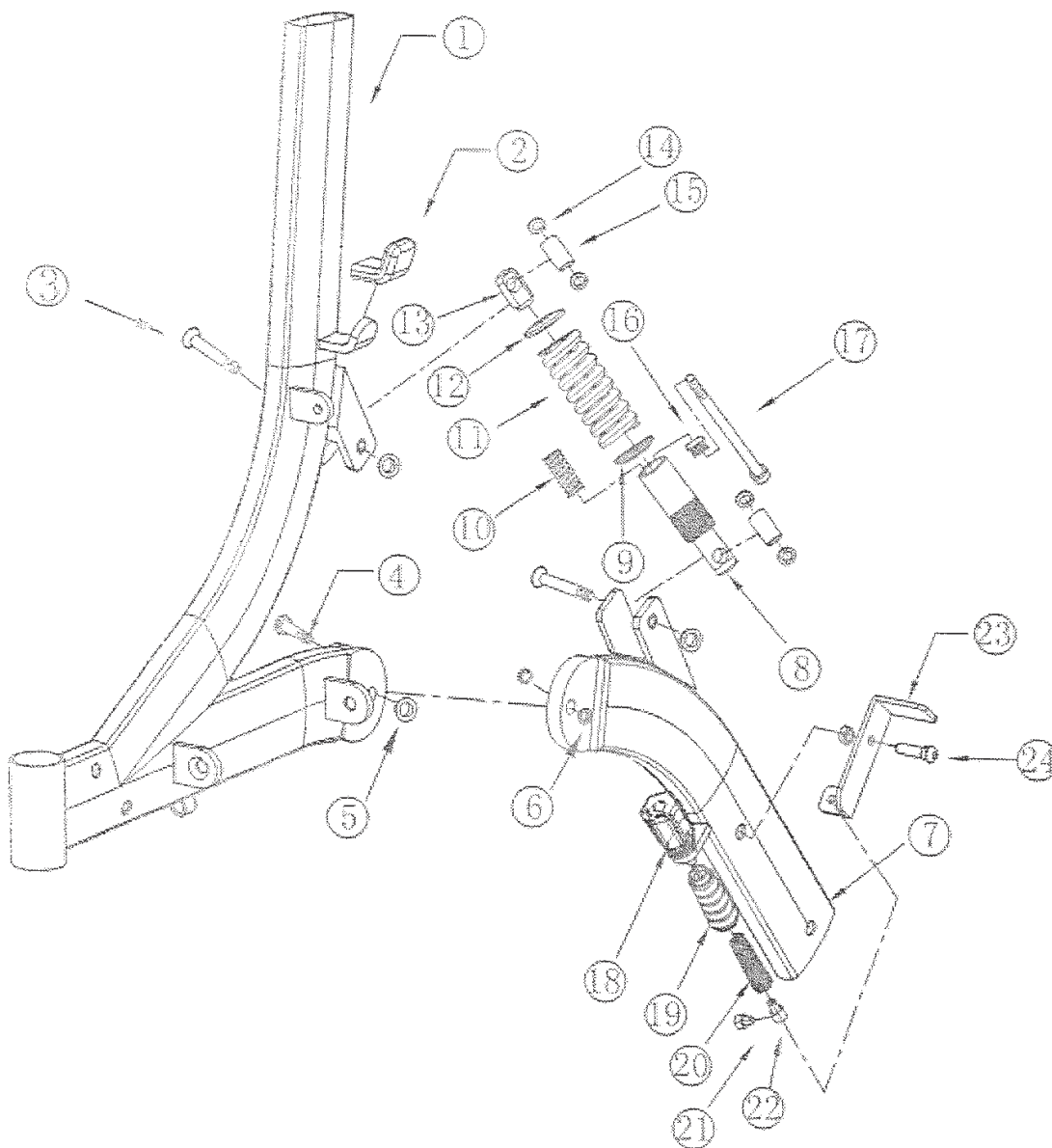


Rahmen ROLLATOR SPRING

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
02	SPR-11	Auflagegummi
03, 08-17	SPR-12	Federeinheit SPRING
18	SPR-13	Einstellmutter Feststellbremse SPRING
19-22	SPR-14	Feder und Abdeckung Feststellbremse SPRING
23, 24	SPR-15	Feststellbremse mit Befestigungsschrauben SPRING
18-24	SPR-15S	Bremse mit allen Teilen SPRING

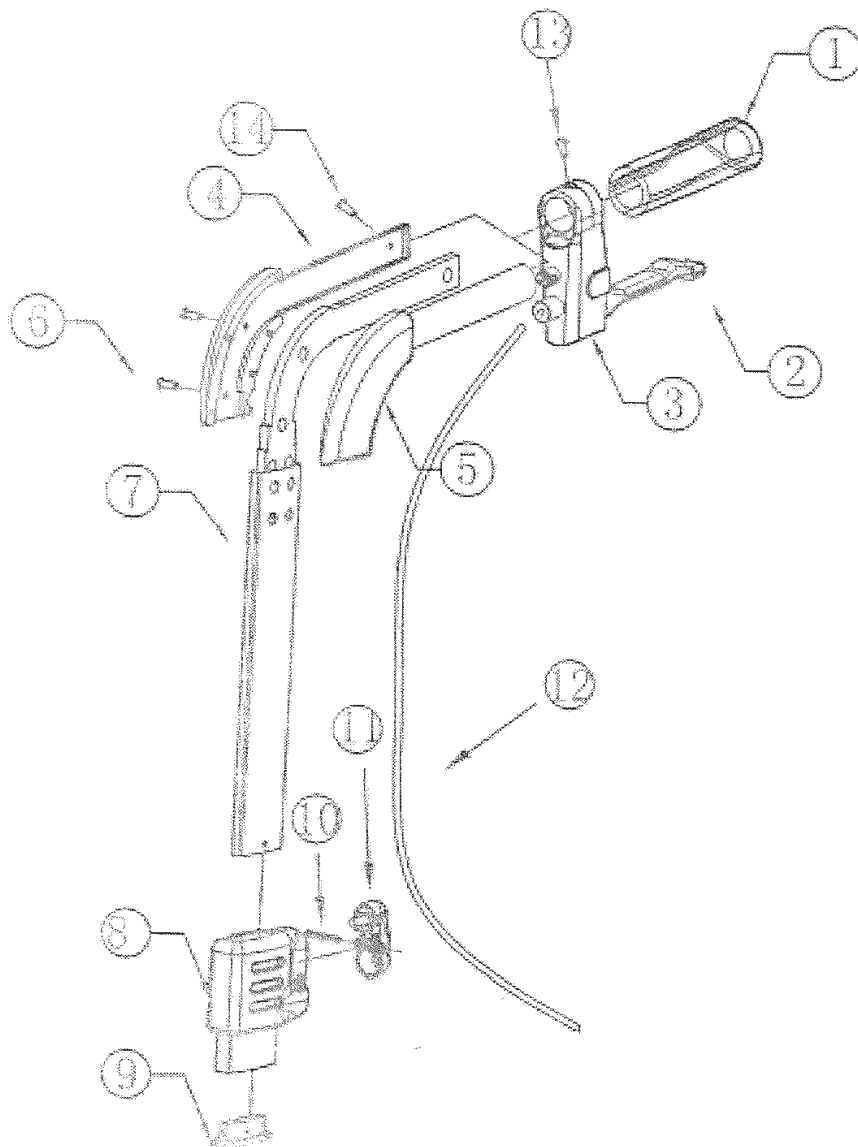


Schiebegriffe ROLLATOR SPRING

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
01	SPR-31L	Schiebegriffgummi links
01	SPR-32R	Schiebegriffgummi rechts
02, 03, 12, 13	SPR-32-52	Bremsgriff mit Kabel SPRING M
02, 03, 12, 13	SPR-32-60	Bremsgriff mit Kabel SPRING L
04-07, 09, 14	SPR-33L	Schiebegriff links ohne Bremse SPRING
04-07, 09, 14	SPR-33R	Schiebegriff rechts ohne Bremse SPRING
08, 10, 11	SPR-34	Höheneinstellung Schiebegriffe SPRING

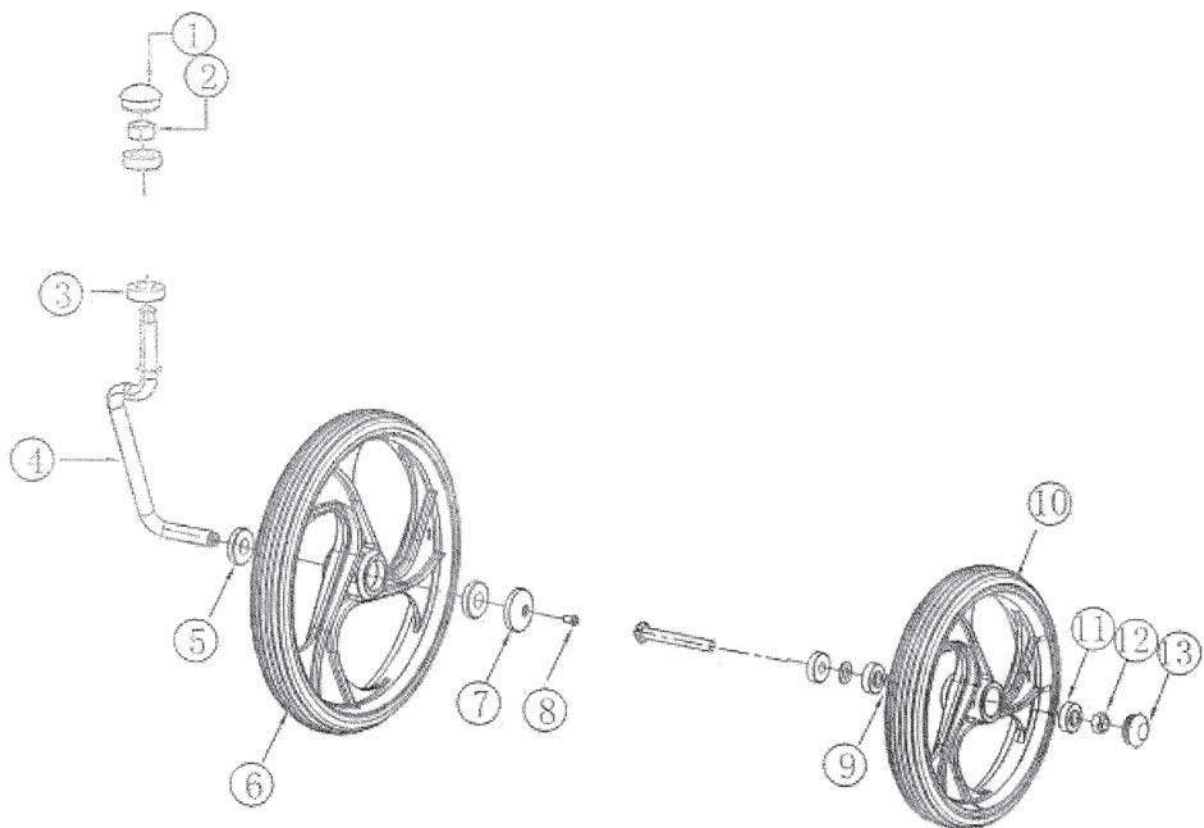


Vorder- und Hinterräder ROLLATOR SPRING

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
01	SPR-41	Staubkappe SPRING
13	SPR-42	Schutzkappe Hinterrad
01-08	SPR-44L	Set Vorderrad, links, 245 mm, komplett, SPRING
01-08	SPR-44R	Set Vorderrad, rechts, 245 mm, komplett, SPRING
09-13	SPR-45L	Set Hinterrad, links, 200 mm, komplett, SPRING
09-13	SPR-45R	Set Hinterrad, rechts, 200 mm, komplett, SPRING

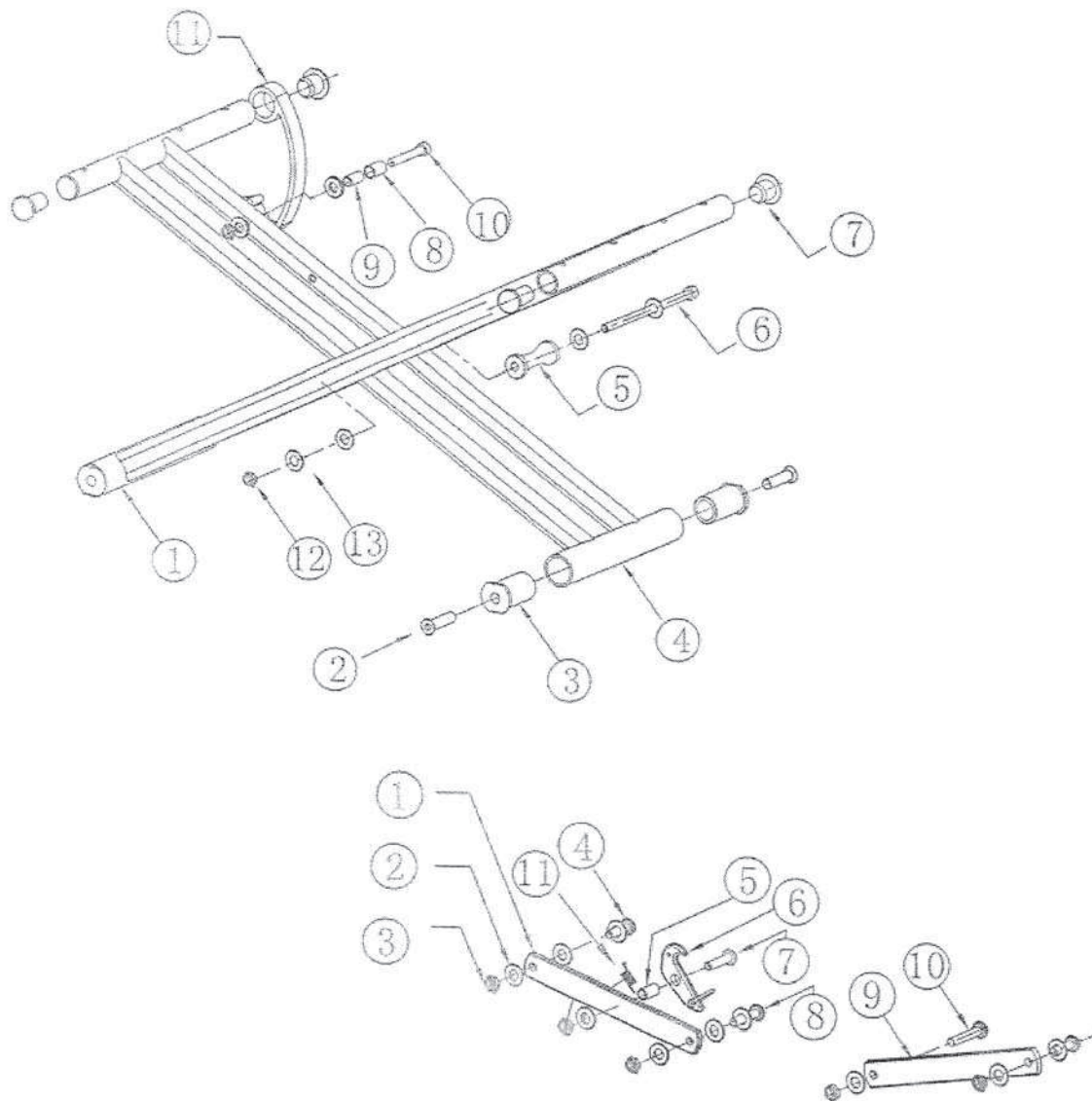

Kreuzstrebe ROLLATOR SPRING

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
01-07, 12-14	SPR-21	Kreuzstrebe SPRING M
01-07, 12-14	SPR-21	Kreuzstrebe SPRING L
11	SPR-22	Haltebügel, rot, SPRING
08-10	SPR-23	Set Schrauben Kreuzstrebe SPRING

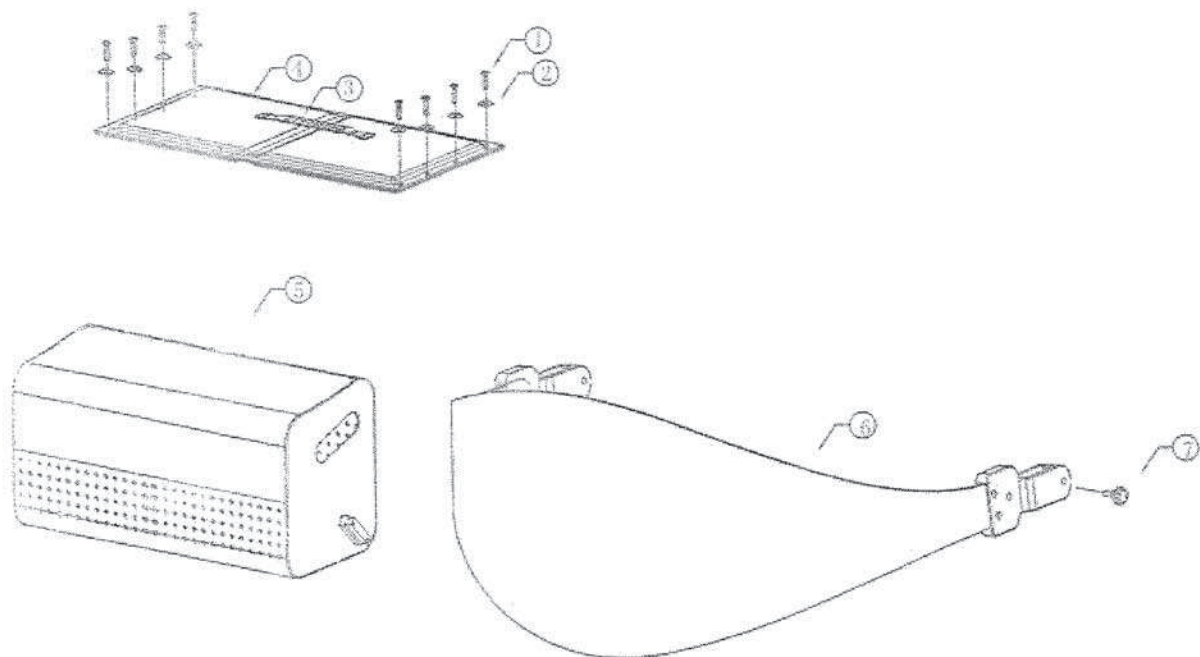

Sitzgurt und Zubehör ROLLATOR SPRING

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
01, 02	SPR-51	Set Schrauben und Unterlegscheiben SPRING
03	SPR-52	Faltschlaufe SPRING
04	SPR-53	Sitzgurt SPRING
05	SPR-54	Netzkorb SPRING
06, 07	SPR-55	Rückengurt SPRING
ohne Abb.	SPR-16	Ankipphilfe komplett für SPRING
ohne Abb.	SPR-17	Stockhalter für SPRING